

1

電池の出し入れ・充電方法

あなたの補聴器で
使う電池は
これです



A 充電式

充電方法

補聴器を充電器
(チャージャーケース)
に設置します。



耳栓やイヤモールドが本製品の内側に向かって収まるように置きます。

自動的に補聴器の電源が切れ、充電が始まります。


表示ランプの状態

- ・ 緑色に点滅：充電中
- ・ 緑色に点灯：フル充電

補聴器を充電ポートから取り外すと、自動的に電源が入ります。

B 電池交換式

新しい電池のシールをはがす

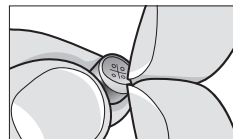


新しい電池から色付きのシールをはがします。


シールを取り外してから3~5分待つてから、電池を挿入します。

※電池に湿気がついている場合には、拭き取ってから入れてください。


電池の出し入れ方法

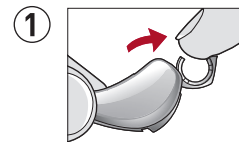


電池ドアのフィンガーピックを指先にひっかけます。

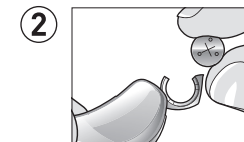

電池ドアをそっと開き、古い電池を取り外します。

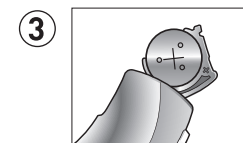

新しい電池の「+ (プラス) 面」(電池の平らな面)を電池ドアの「+ (プラス)」に合わせます。

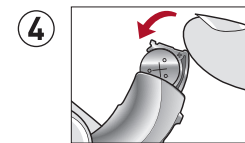

電池ドアを閉じます。


2

耳への着け方

補聴器 (左耳 / 右耳) の確認


RIC

レシーバーの先端が
青は左耳、赤は右耳
の補聴器です。

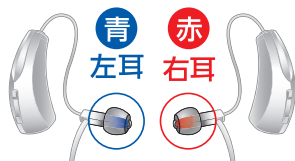


BTE

背面の左右識別バーが
青は左耳、赤は右耳
の補聴器です。

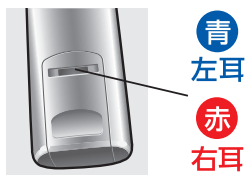

着け方

①

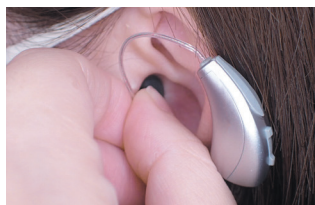

親指と人差し指で、レシーバーの前の曲がり角でケーブルを持ちます。レシーバーを外耳道にそっと挿入します。

②



補聴器を耳の上に置き、耳の後ろに注意深く置きます。

あなたの補聴器で使う
イヤピースまたはイヤモールドはこれです

既成タイプ
(イヤピース)

- シリコンモールド
- 中空シリコンモールド
- ヘリックスモールド
- オープンチップ
- クローズチップ
- スマートチューブシリコンモールド

カスタムタイプ
(イヤモールド)

- BTE 標準チューブ
- BTE 細チューブ

※お買い上げの販売店にて定期的な交換をおすすめします。

3

耳からの外し方

外し方

①



耳の中からイヤピースを取り出して
ください。

②



補聴器本体を耳の後ろから外して
ください。

! 外す際は、補聴器本体を引っ張らないでください。
接続部が損傷する可能性があります。

4

充電・保管方法

補聴器を使用していない時、特に就寝時には保管します

充電式

ドライカプセルをチャージャーケースのふた部分にあるホルダーにはさみ、やわらかい布で補聴器を拭いてからふたを閉じて保管します。



ドライカプセル

交換目安：約2週間

(青やピンク→うすいピンクや透明に変化)

電池交換式

補聴器の電池は乾燥に弱いため、乾燥ケースに入れるときは、**必ず外してください。**

電池はふたの上面の電池置きシートに置きます。磁石が付いているので、平らな面(+極)を下にして置いてください。



電池 → ふたの上

補聴器 → 乾燥ケースの中

5

お手入れの仕方

本体のお手入れ



補聴器本体に水分や汚れが付着した際は、柔らかい布などで、速やかに拭き取ってください。

イヤチップの場合

毎日 お手入れしてください。

付属のブラシや綿棒で耳垢やホコリを取り除いてください。




チップは洗浄しないでください。チップは簡単に交換ができます。汚れたり古くなってきた際は、交換してください。交換が難しい場合は、販売店へご相談ください。

交換方法

チップの取り外し

レシーバーやイヤチューブの根元をしっかりと持ち、ひねらずに真っすぐ抜きます。

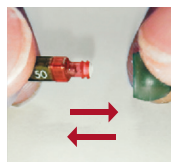

チップの取り付け

チップが抜け落ちないように必ずしっかりと奥まで押し込んでください。

イヤモールドの場合

定期的に お手入れしてください。

やわらかい布で耳垢などを拭き取ってください。



汚れたり古くなってきた際は、交換してください。交換が難しい場合は、販売店へご相談ください。

交換方法

イヤモールドの取り外し

レシーバーやイヤチューブの根元をしっかりと持ち、ひねらずに真っすぐ抜きます。




イヤモールドの取り付け

イヤモールドが抜け落ちないように必ずしっかりと奥まで押し込んでください。


ワックスガードの交換方法

使い捨てのワックスガードで、補聴器レシーバーへの耳垢の蓄積を防ぎます。

- ① 新しいスティックを取り出し、端を補聴器の使用済みワックスガードにまっすぐ挿入します。
- ② スティックをまっすぐ引き出し(ねじらないでください)、使用済みのワックスガードを取り外します。

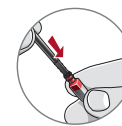

- ③ スティックの反対側の端を使用して、きれいなワックスガードを補聴器にまっすぐしっかりと挿入します。

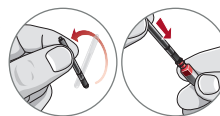

- ④ スティックを取り外して廃棄するために、まっすぐに引き出します(ねじらないでください)。

