


1

電池の出し入れ・充電方法

あなたの補聴器で  
使う電池は  
これです

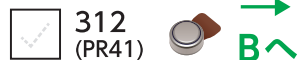

A 充電式

充電方法



補聴器を充電器  
(チャージャーケース)  
に設置します。

フェイスプレート(充電端子\*が付いている面)を下に向けて置きます。

自動的に補聴器の電源が切れ、充電が始まります。


表示ランプの状態

- 緑色に点滅：充電中
- 緑色に点灯：フル充電

補聴器を充電ポートから取り外すと、自動的に電源が入ります。

B 電池交換式

新しい電池のシールをはがす

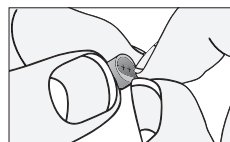


新しい電池から色付きのシールをはがします。


シールを取り外してから3~5分待つてから、電池を挿入します。

※電池に湿気がついている場合には、拭き取ってから入れてください。


電池の出し入れ方法

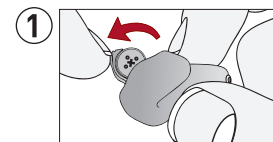


電池ドアのフィンガーピックを指先にひっかけます。

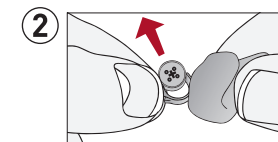

電池ドアをそっと開き、古い電池を取り外します。

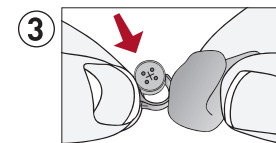

新しい電池の「+ (プラス) 面」(電池の平らな面)を電池ドアの「+ (プラス)」に合わせます。

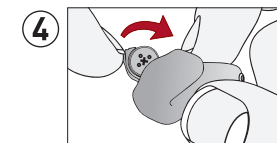

電池ドアを閉じます。

2


耳への着け方

補聴器(左耳/右耳)の確認

青い印字は左耳、  
赤い印字は右耳  
の補聴器です。

ブラックの場合

「L」は左耳  
「R」は右耳  
の補聴器です。

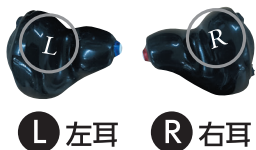

ITC / HS / ITE の場合

①



耳の穴の前に合わせて、親指と人差し指で補聴器をしっかり持ち、まっすぐ耳の中に入れてください。

②



後方に(背中側)に回しながら外耳道にそっと入れます。


③



指先で、そっと押し込みます。

IIC / CIC の場合

①

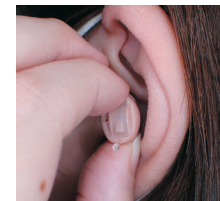

耳の穴の前に合わせて、親指と人差し指で補聴器をしっかり持ち、まっすぐ耳の中に入れてください。

②



後方に(背中側)に回しながら外耳道にそっと入れます。

③



指先で、そっと押し込みます。

### 3

#### 耳からの外し方

##### ITC / HS / ITE の外し方



耳たぶを図のように持ち、耳たぶのうしろから親指で補聴器を押し上げてください。  
少し耳の穴(外耳道)からでましたら、テグスまたは補聴器をつかんでゆっくり取り出してください。

##### IIC / CIC の外し方



耳たぶのうしろから押し上げ、テグスはまっすぐに引っばってください。

### 4

#### 充電・保管方法

##### 補聴器を使用していない時、特に就寝時には保管します

##### 充電式

ドライカプセルをチャージャーケース内に置き、やわらかい布で補聴器を拭いてからふたを閉じて保管します。



ドライカプセル  
交換目安：約2週間  
(青やピンク→うすいピンクや透明に変化)

##### 電池交換式

補聴器の電池は乾燥に弱いので、乾燥ケースに入れるときは、**必ず外してください。**

電池はふたの上面の電池置きシートに置きます。磁石が付いているので、平らな面(+極)を下にして置いてください。





電池 → ふたの上      補聴器 → 乾燥ケースの中

### 5

#### お手入れの仕方

音の出口の部分やマイクに耳垢が少しでもついていたら、清掃ブラシを横にしてはらってください。

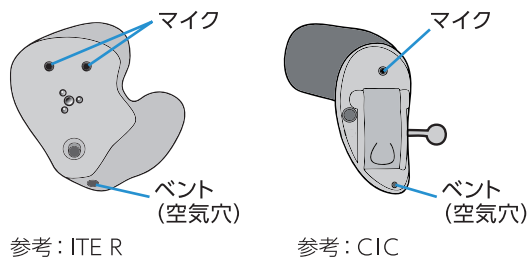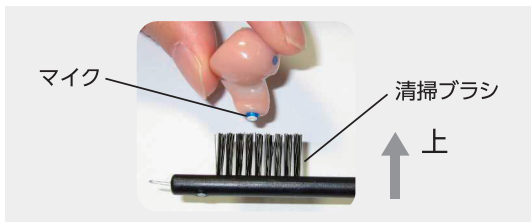

ベント(空気穴)が開いている場合には、ブラシを穴にねじりながら差し込んで汚れを取り除いてください。



! 音の出口にブラシを差し込むと補聴器が故障することがありますのでお止めください。

! マイクの穴にホコリや汚れが溜まっていると、補聴器の性能が低下してしまいます。穴に付着しているホコリなどは慎重に取り除いてください。

清掃ブラシの部分に汚れが溜まってきたら交換してください。清掃ブラシは販売店にてご購入いただけます。お掃除が難しい場合は、販売店へご相談ください。

#### あなたの補聴器で使う 耳垢防止フィルターとマイクカバーはこれです

##### 耳垢防止 フィルターは

- ホワイトワックスガード
- フタ式
- スプリング
- ワックスキャップ

##### マイクカバーは

- 大     小

(カラー)

※お買い上げの販売店にて定期的な交換をおすすめします。