



Destiny<sup>TM</sup>  
デスティニー シリーズ

## SPECIFICATION

### P675デスティニーパワープラス 製品技術資料

“P675デスティニーパワープラス”は、重度難聴まで対応する、パワータイプのデジタル耳かけ補聴器です。これまで高出カタイプで気になっていたハウリングを、最新のテクノロジーにより強力に防止します。

#### ★ アクティブフィードバックインターセプト

16のサブバンドを用い、ハウリングが発生する前に除去。最大25 dBの余裕利得が持てます。帽子をかぶったりする際などのハウリングに悩むことはありません。高度難聴の方、成長期のお子様のハウリング防止にも最適です。

#### ★ 音響認識

音の統計的な特徴を元に行う、全く新しい方法の環境認知・ノイズ抑制方式です。瞬時に周囲の音を認識・分類します。周囲の状況が変わってもスムーズかつ自然に音を調整し、ことばの聞き取りを助けます。

#### ★ 指向性スピーチディテクター

ダイナミック指向性により大きな環境の変化にも柔軟に対応します。うるさいところでSN比を改善し、聞きたい音を聞き分けます。

#### ★ データログ

補聴器の使用状況・履歴を記録し、インスパイアOS(フィッティングソフト)上で最適な調整方法を提案します。

#### ★ 柔軟な圧縮特性

統計データに基づいた設定により、全ての周波数で言葉の聞き取りを最大限に向上させます。小さな入力音、平均的な入力音、大きな入力音のいずれも快適に聞くことができます。

#### ★ アダプティブお知らせ音

最適ボリューム位置、電池交換時期、電話モード、メモリー切り換え、スタンバイ状態を楽しい音でお知らせします。周囲の騒音の状況によって、お知らせする音の大きさが変わります。

#### ★ マルチメモリー

インスパイアOS上で、7つの環境設定の中からメモリー環境を選ぶことができます。最大4つのメモリー設定が可能です。

#### ★ ボリュームコントロール付オン・オフスイッチ

ボリュームコントロールに補聴器電源のオン・オフスイッチの機能を持たせました。ボリュームを最小にすると電源がオフになります。

#### ★ オートマチックホン

電話に最適な調整メモリーに自動的に切り換わります。

#### ★ オートコイル

誘導コイルで電話から直接、誘導信号を入力します。

#### ★ パワーオン遅延

電源を入れてから音が出力されるまでの時間を遅らせます。

#### ★ インスパイアOS 2.0 以上で対応



## オプション

#### ★ オーディオインプット対応

#### ★ 誤操作防止ボリュームカバー

#### ★ 小児用/成人用イヤーフック

#### ★ 豊富なケースカラー



ベージュ(標準カラー)

アイス

パープルアイス



ブラウン

ブラック


ライトグレー

## ★P675デスティニーパワープラス製品仕様

		ANSI	JIS
90dB最大出力音圧レベル (dB SPL)	ピーク	140	147
	1600Hz	-	139
最大音響利得 (dB)	ピーク	80	84
	1600Hz	-	78
規準周波数 (kHz)		1.0, 1.6, 2.5	1.6
等価入力雑音レベル (dB SPL)		<30	<31
誘導コイル感度 (dB SPL, 規準利得)		138	118
使用電池		PR44(675)	
電池の電流 (mA)		1.5	1.5
電池寿命 (時間)		250	250
適用聴力範囲		中等度～重度	


- このデータはANSI S 3.22(1996)、JIS C 5512(2000)に基づいて測定されています。
- 実際の電池寿命は使用状態によって変化します。
- 改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

## ★適応聴力範囲

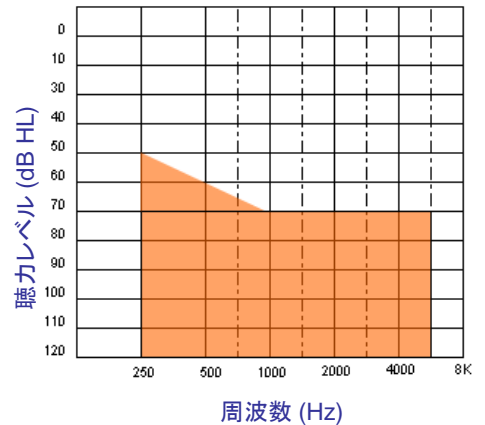


## ★P675デスティニーパワープラス機能早見表

アクティブフィードバックインターセプト	
音響認識	静寂
	他の会話
	機械音
	風
	適応度設定
	時定数設定
指向性スピーチディテクター	
データログ	静寂
	他の会話
	機械音
	風
	指向性
	推奨調整
圧縮特性	
	ニーポイント設定
	時定数設定
周波数特性	
	12バンド
	8チャンネル
アダプティブお知らせ音	
マルチメモリー	
ボリュームコントロール付オン・オフスイッチ	
オートマチックホン	
オートコイル	
パワーオン遅延	

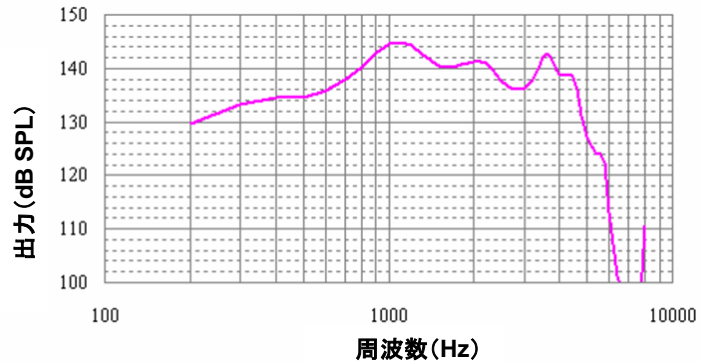

ダンパーなしイヤフック使用時の  
OSPL90(イヤシュミレータによる測定)

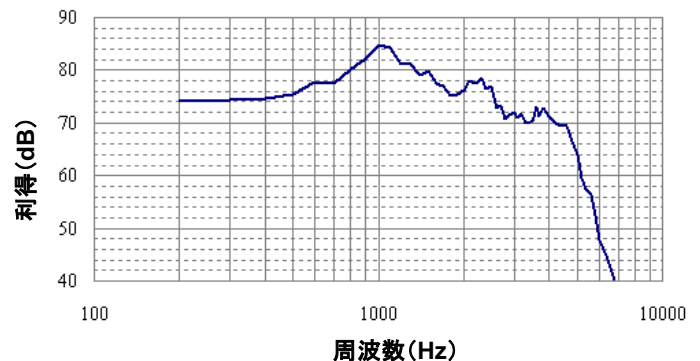

ダンパーなしイヤフック使用時の  
最大音響利得(イヤシュミレータによる測定)

### 認証番号

P675デスティニーパワープラス: 219ADBZX00153000



SPEC0038-01-JJ-JP  
JPYSP-038

FM 90185/ISO 9001: 2000  
MD 84856/ISO 13485: 2003

スターキージャパン株式会社  
横浜市都筑区仲町台5-2-20  
フリーダイヤル: 0120-045-190